




## A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION

Veuillez suivre les recommandations suivantes afin de réaliser le prélèvement et poser les boucles de façon optimale.

Boucles de naissance N98 ou N10  
avec biopsie auriculaire

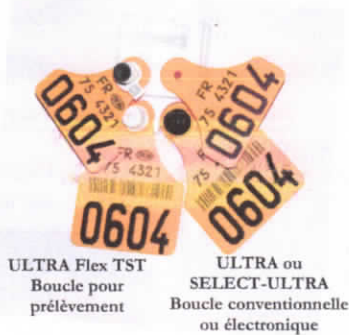

### 1- Contenu de la commande :

A chaque paire de boucles de naissance, peuvent être associés :

- 1 enveloppe pré affranchie,
- 1 sachet mini-grip,
- 1 étiquette adresse laboratoire,
- Selon le département : 1 étiquette échantillon



Utiliser la pince spécifique pour poser l'ULTRA Flex TST :  
Pince PRELEVEMENT TST jaune/noire (réf. 660 00 320)

### 2- Préparation de la boucle de prélèvement :



Toutes les pièces sont marquées au même numéro et présentées ensemble sur la barrette. **NE PAS LES DISSOCIER.**

#### 2.1 Mise en place de la pièce mâle ① :



Appuyer sur le verrou situé sur le côté de la pince.  
Insérer la pièce mâle ① jusqu'en butée et relâcher le verrou.  
La pièce mâle est en place.

#### 2.2 Mise en place de la pièce femelle ② :



Appuyer sur la pédale.  
Insérer la pièce femelle ② jusqu'en butée.  
Puis relâcher la pédale.  
La pièce femelle est en place.

**Ne pas retirer le capuchon vert, ni le détériorer avant la pose**  
Il doit rester intègre en position plane pour réussir la pose et le prélèvement.  
**Ne pas l'enfoncer à l'intérieur de la tête femelle en réalisant l'approche des deux pièces mâle et femelle pour vérifier l'alignement avant pose, si vous avez bien placé la pièce femelle en butée au bout de l'adaptateur/pédale, les pièces seront forcément alignées.**



### 3- Mise en place de la boucle et prélèvement :


Contentionner l'animal et attendre qu'il se soit calmé.  
**L'animal ne doit pas bouger pendant la pose et le prélèvement.**



La réussite de la pose et du prélèvement en dépendent.

La boucle ULTRA Flex TST doit être posée sur l'oreille droite.

Positionner la boucle entre les 2 nervures (représentées par les traits blancs), à un tiers de distance de la tête (cible jaune)

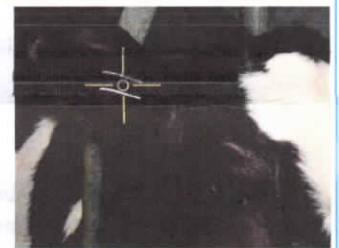

La partie femelle ② est placée à l'intérieur de l'oreille.



Serrer fermement, rapidement et jusqu'en butée complète la pince. Vous entendez l'encliquetage. Ouvrir la pince immédiatement après l'encliquetage.



Après la pose, pour vérifier la bonne tenue de la boucle, tenez chaque pièce avec une main et réalisez des rotations inversées entre ces deux pièces : cela vous permet de vérifier qu'elles sont bien encliquetées ensemble.

La boucle ULTRA Flex TST est posée définitivement à l'oreille, elle est reconnaissable à sa tête blanche.

L'aiguille de prélèvement reste sur la pince.

